



Открытое акционерное общество "Ратон"

Подставка для руки П-1

Паспорт

Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.96520/2508 от 16.03.2021



1 Назначение

Подставка для руки П-1 (далее – подставка) предназначена для размещения на ней кисти руки и/или предплечья пациента при проведении забора крови, массажа, различных процедур и манипуляций в операционных, перевязочных, кабинетах врачей, в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию подставки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры подставки:

длина – 550 мм, ширина – 360 мм, регулируемая высота – от 700 до 870 мм.

Масса подставки не более 9 кг.

Максимальная нагрузка на подставку – 15 кг.

Подставка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

Подставка для руки П-1 – 1 шт.,

паспорт – 1 шт.

4 Устройство и подготовка подставки к работе

Подготовка подставки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Подставка представляет собой конструкцию, выполненную в виде металлического основания и мягкого элемента (столика) с обивкой из винилискожи. Предусмотрена регулировка столика по высоте, фиксация столика осуществляется зажимным винтом. Основание имеет порошковое полимерное покрытие. Подставка установлена на регулируемые опоры. Поверхности подставки устойчивы к механическим и химическим воздействиям.

Освободите подставку от упаковки. Установите и зафиксируйте столик в необходимом положении на требуемой высоте. При необходимости обеспечьте устойчивое положение подставки регулируемыми опорами.

Произведите санитарную обработку подставки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого подставка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Подставка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подставки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи подставки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении подставки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246044, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
ОАО «Ратон»
+375 232 58 42 72, +375 232 33 35 24
e-mail: info@raton.by

7 Свидетельство о приемке

Подставка для руки П-1 соответствует техническим условиям

ТУ РБ ВУ 810000916.009-2009 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)



----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения: Подставка для руки П-1
(наименование)

ТУ ВУ 810000916.009-2009
(номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТТН заполняется потребителем)