



Открытое акционерное общество "Ратон"

Стол медицинский  
двухтумбовый  
СМГ 2

модель СМГ 2.2

Паспорт



*Регистрационное удостоверение  
Министерства здравоохранения РБ  
№ ИМ-7.105994/2508 от 29.11.2022*

## 1 Назначение

Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2, модель СМГ 2.2 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

## 2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:

длина – 1500 мм, ширина – 600 мм, высота – 750 мм.

Масса стола не более 35 кг.

Допустимые нагрузки: на столешницу – 80 кг, на ящик – 5 кг, на полку – 5 кг.

Стол драгметаллов не содержит.

## 3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

## 4 Устройство стола и указания по эксплуатации

*Подготовка стола к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.*

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса с двумя тумбами: тумбой с распашной дверцей и двумя полками, и тумбой с четырьмя выдвижными ящиками, и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию с Заказчиком). Предусмотрена возможность установки легкосъемных полок тумбы с дверцей на различной высоте. Также предусмотрена возможность изменения расположения тумб и дверцы тумбы переустановкой на удобную сторону самим потребителем. Материалы, применяемые при изготовлении стола, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите стол от упаковки, произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

## 5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

## 6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

**Адрес предприятия-изготовителя:** 246044, Республика Беларусь,  
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19  
ОАО «Ратон»  
+375 232 58 42 72, +375 232 33 35 24  
e-mail: info@raton.by

## 7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2, модель СМГ 2.2

соответствует техническим условиям ТУ ВУ 810000916.016-2017

и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_  
(подпись) (штамп ОТК)

----- Линия отреза -----

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

**Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2**

(наименование)

**модель СМГ 2.2** **ТУ ВУ 810000916.016-2017**

(обозначение модели)

(номер ТУ)

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен \_\_\_\_\_  
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА  
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изымают  
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)