



Открытое акционерное общество "Ратон"

Кушетка смотровая КС-2

Паспорт

*Регистрационное удостоверение  
Министерства здравоохранения РБ  
№ ИМ-7.2914/2508 от 16.03.2021*



## 1 Назначение

Кушетка смотровая КС-2 (далее - кушетка) предназначена для удобного размещения на ней пациента во время проведения медицинского осмотра и процедур в медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию кушетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

## 2 Технические характеристики

Габаритные размеры кушетки:

длина – 1915 мм,

ширина – 650 мм,

высота – 800 мм до поверхности ложа.

Масса кушетки не более 35 кг.

**Максимальная нагрузка на кушетку 145 кг с распределением:**

**20 % на поднимающееся изголовье, 80 % на неподвижную часть сидения.**

Кушетка драгметаллов не содержит.

## 3 Комплектность

В комплект поставки входят: Кушетка смотровая КС-2 - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

## 4 Устройство и подготовка кушетки к работе

*Подготовка кушетки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.*

Кушетка представляет собой конструкцию, выполненную из сварного металлического каркаса с полимерным покрытием и мягкого сиденья с обивкой из материала, выдерживающего многократную влажную обработку и дезинфекцию. Изголовье кушетки регулируется по углу наклона и надежно фиксируется в различных положениях. Регулировка и фиксация угла наклона изголовья осуществляется с помощью механизма «Rastomat» следующим образом: поднимите изголовье вверх до упора (при этом фиксатор отключается), затем опустите до упора вниз; приведите изголовье в требуемое положение, для чего из крайнего нижнего положения плавно поднимите изголовье до необходимого положения, при этом происходит срабатывание механизма фиксатора, сопровождаемое характерным щелчком. Нажатием на изголовье убедитесь в надежности фиксации.

Освободите кушетку от упаковки.

Произведите санитарную обработку кушетки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого кушетка готова к эксплуатации.

## 5 Транспортирование и хранение

Кушетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

## 6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи кушетки потребителю. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении кушетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

**Адрес предприятия-изготовителя:** 246044, Республика Беларусь,  
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19  
ОАО «Ратон»  
+375 232 58 42 72, +375 232 33 35 24  
e-mail: info@raton.by

## 7 Свидетельство о приемке

Кушетка смотровая КС-2 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_  
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА  
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят  
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный

----- Линия отреза -----

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения: Кушетка смотровая КС-2  
(наименование)

ТУ РБ 14440234.001-94  
(номер ТУ)

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена \_\_\_\_\_  
(дата, № ТТН заполняется потребителем)