



Открытое акционерное общество "Ратон"

Кушетка массажная КМ-1-01

Паспорт

*Регистрационное удостоверение  
Министерства здравоохранения РБ  
№ ИМ-7.2914/2508 от 16.03.2021*



## 1 Назначение

Кушетка массажная КМ-1-01 (далее - кушетка) предназначена для удобного размещения на ней пациента при проведении разностороннего массажа в лечебных, физкультурно-оздоровительных, санаторно-курортных и других медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию кушетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

## 2 Технические характеристики

Габаритные размеры кушетки (длина х ширина х высота), мм - 1840 х 650 х 810 (не более 2000 х 660 х 820).

Угол регулировки изголовья – от 0 до +45° к горизонтали.

Габаритные размеры ступени (длина х ширина х высота), мм - 410 х 300 х 345.

Габаритные размеры валиков: длина – 500 мм, диаметр – 100 мм и 150 мм.

Масса кушетки не более 40 кг, масса ступени не более 2,5 кг.

Максимальная нагрузка на кушетку и ступень 125 кг.

Кушетка драгметаллов не содержит.

## 3 Комплектность

В комплект поставки входят: Кушетка массажная КМ-1-01 – 1 шт., в том числе:  
ступень – 1 шт., валики – 2 шт.,  
Паспорт – 1 шт.

## 4 Устройство и подготовка кушетки к эксплуатации

*Подготовка кушетки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.*

Кушетка представляет собой конструкцию повышенной устойчивости, выполнена из усиленного каркаса, изготовленного из стального профиля с нанесением эпоксидно-полимерного покрытия, и мягкого ложа с обивкой винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Изголовье кушетки регулируется по углу наклона.

Освободите кушетку, ступень и валики от упаковки.

Произведите санитарную обработку кушетки, ступени и валиков средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению.

После этого кушетка готова к эксплуатации.

## 5 Транспортирование и хранение

Кушетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.

## 6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи кушетки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении кушетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

**Адрес предприятия-изготовителя:** 246044, Республика Беларусь,  
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19  
ОАО «Ратон»  
+375 232 58 42 72, +375 232 33 35 24  
e-mail: info@raton.by

## 7 Свидетельство о приемке

Кушетка массажная КМ-1-01 соответствует техническим условиям  
ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_  
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА  
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят  
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

----- Линия отреза -----

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

**Кушетка массажная КМ-1-01**

(наименование)

**ТУ РБ 14440234.001-94**

(номер ТУ)

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена \_\_\_\_\_  
(дата, № ТТН заполняется потребителем)