

Проверьте тормозные устройства каталки, нажимая поочередно на педали.
Произведите санитарную обработку каталки дезинфектантом в соответствии с инструкцией производителя по его применению.

7 Техническое обслуживание

Каталка должна содержаться в чистоте.

Периодически, не реже одного раза в квартал, подтягивайте болтовые соединения колесных опор.

8 Транспортирование и хранение

Каталка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

9 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каталки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации каталки 24 месяца со дня передачи каталки потребителю.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

В случае самостоятельного ремонта потребитель теряет право на гарантийный ремонт.

При направлении каталки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246044, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
ОАО «Ратон»
+375 232 58 42 72, +375 232 33 35 24
e-mail: info@raton.by

10 Свидетельство о приемке

Каталка медицинская КА-1 соответствует техническим условиям
ТУ BY 400416396.007-2006 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подписи лиц,
ответственных
за приемку _____

МП



Открытое акционерное общество "Ратон"

Каталка медицинская КА-1

Паспорт

*Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.100831/2508 от 04.07.2023*



1 Назначение

Каталка медицинская КА-1 (далее – каталка) со съемной панелью (далее – носилки) предназначена для использования в анатомических отделениях и моргах медицинских учреждений.

Каталка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при температуре 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию каталки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры каталки с установленными носилками (длина х ширина х высота), мм – 2400 х 580 х 800

Габаритные размеры каркаса (длина х ширина х высота), мм – 1890 х 575 х 765

Габаритные размеры носилок (длина х ширина х высота), мм – 2400 х 580 х 200

Масса каталки – не более 35 кг, масса носилок – 19 кг

Максимальная нагрузка на каталку – 200 кг.

Каталка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Каталка медицинская КА-1 – 1 шт., в том числе:

каркас – 1 шт.,

носилки* – 1 шт.,

колесные опоры* – 4 шт.,

крепежные изделия – 1 комплект.

Паспорт – 1 экз.

* - сняты на время транспортирования

4 Требования безопасности

При эксплуатации каталки необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

оставляя каталку без присмотра, необходимо ее затормозить нажатием на педаль тормозного устройства, расположенную на колесе каталки.

5 Устройство каталки

Каталка состоит из каркаса, на котором установлены съемные носилки. Каркас и рама носилок выполнены из стального профиля, сварные, с нанесением эпоксидно-полимерного покрытия, устойчивого к механическим и химическим воздействиям. Ложё носилок изготовлено из нержавеющей стали и выполнено с прогибом. Материалы выдерживают многократную влажную обработку и дезинфекцию. Торможение колес осуществляется с помощью педалей.

6 Подготовка каталки к работе

Подготовка каталки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Освободите каталку и части, снятые на время транспортирования, от упаковки.

Произведите монтаж колес на каркасе каталки по схеме: колеса с тормозными устройствами устанавливаются по противоположным сторонам диагонали каталки, т. е. на одной стороне должно быть установлено одно колесо с тормозным устройством и одно без него.

----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

Каталка медицинская КА-1

(наименование)

ТУ ВУ 400416396.007-2006

(номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА
Гарантийный талон изъять
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)