



Открытое акционерное общество "Ратон"

Подставка П-2

Паспорт

Регистрационное удостоверение  
Министерства здравоохранения РБ  
№ ИМ-7.96520/2508 от 16.03.2021



## 1 Назначение

Подставка П-2 (далее – подставка) предназначена для размещения на ней инструмента, материалов и медикаментов в операционных, перевязочных, кабинетах врачей, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию подставки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

## 2 Технические характеристики

Габаритные размеры подставки не более:

длина – 765 мм, ширина – 450 мм, регулируемая высота – от 830 до 1250 мм.;

габаритные размеры поддона: длина – 600 мм, ширина – 450 мм, глубина – 15 мм

масса подставки не более 10 кг;

максимальная нагрузка на подставку – 10 кг.

Подставка драгметаллов не содержит.

## 3 Комплектность

В комплект поставки входят: Подставка П-2 – 1 шт., паспорт – 1 шт.

## 4 Устройство и подготовка подставки к работе

*Подготовка подставки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.*

Подставка представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде основания и столика со съемным поддоном. Предусмотрена регулировка столика по высоте, фиксация столика осуществляется зажимным винтом. Основание и каркас столика имеют порошковое полимерное покрытие, поддон изготовлен из нержавеющей стали. Поверхности подставки устойчивы к механическим и химическим воздействиям. Подставка установлена на четыре колесные опоры, две из которых оборудованы тормозным устройством.

Освободите подставку от упаковки, снимите защитную пленку с поддона (при наличии). Установите и зафиксируйте столик в необходимом положении на требуемой высоте.

Произведите санитарную обработку подставки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого подставка готова к эксплуатации.

## 5 Транспортирование и хранение

Подставка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.

## 6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подставки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении подставки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

**Адрес предприятия-изготовителя:** 246044, Республика Беларусь,  
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19  
ОАО «Ратон»  
+375 232 58 42 72, +375 232 33 35 24  
e-mail: info@raton.by

## 7 Свидетельство о приемке

Подставка П-2 соответствует техническим условиям

ТУ РБ ВУ 810000916.009-2009 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_  
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА  
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят  
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)



----- Линия отреза -----

<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА</b>	
Изделие медицинского назначения:	<u>Подставка П-2</u> (наименование)
<b>ТУ ВУ 810000916.009-2009</b> (номер ТУ)	
Дата изготовления	_____
(заполняется предприятием-изготовителем)	
Приобретена	_____
(дата, № ТТН заполняется потребителем)	